



**Lietošanas instrukcija
regulējams kloķis velotrenažieriem un ķermeņa
augšdaļas ergometriem.**



1 Vispārīgi




Pirms pirmās lietošanas reizes rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju ar visiem drošības norādījumiem un brīdinājumiem, lai nodrošinātu drošu un pareizu lietošanu. Saglabājiet šo dokumentu turpmākai atsaucei un nododiet to citiem, ja nododat ierīci tālāk.

2 Pārskats

- Velosipēds: Regulējams rādiuss no 75 mm līdz 175 mm
- Preces numurs: Z-EF-AL-011/ Z-MED-AL-011 (medicīniskā versija)
- Korpus: regulējams rādiuss no 75 mm līdz 225 mm, iespējama rokturu pārslēgšana no asinhronas uz sinhronu pozīciju.
- Izgatavots tikai no nerūsējošā tērauda, kas izturīgs pret rūsū un skābēm.
- Droša un vienkārša regulēšana - bez instrumentiem
- Īpaši izturīga konstrukcija

längenverstellbares Kurbelset Z-MED-AL-011

adjustable crank arm set

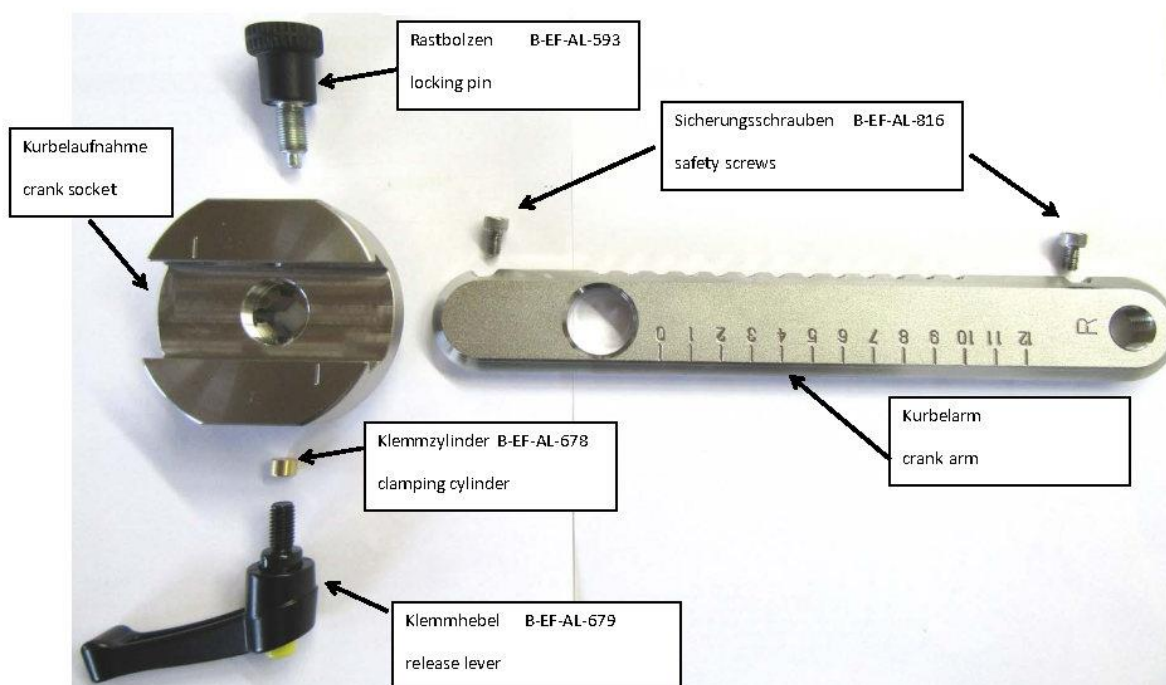

Komponenten ohne Artikelnummer können nicht separat gekauft werden, sondern gehören zu einem kompletten Kurbelset

Parts without article number are not sold separately. They are only available as part of a set of adjustable crank arms

3 Kopšana un uzturēšana

Uzmanību: Pievelciet kloķus un pedāļus.

Pēc pirmajām 10 ekspluatācijas stundām kloķi un pedāļi ir jāpievelk. Ja pedāļi un kloķi nav pievilkti, var rasties ass, kloķu vai pedāļu bojājumi, un šādā gadījumā garantija vairs nav spēkā.

4 Montāžas instrukcija

4.1 Montāžai nepieciešamie instrumenti:

- Skrūvgriezis ar robotu, mazs
- Atslēgas uzgriežņu atslēga SW 15 / 17 / 19
- Sešstūra ligzda SW 14
- Kloķvārpstas novilcējs
- Griezmes momenta uzgriežņu atslēga, iestatīta uz 60 Nm

4.2 1. solis - Pedāļu noņemšana

Noņemiet pedāļus kreisajā un labajā pusē, izmantojot atslēgu SW15. **Uzmanību:** kreisajā pusē skrūvju savienojums atveras UZS, labajā pusē pret UZS.

4.3 Solis2 - kloķvārpstu skrūvju savienojuma ar asi atskrūvēšana

Izmantojot mazo slīpveida skrūvgriezi, noņemiet mazo melno plastmasas vāciņu labajā un kreisajā pusē, kas nosedz kloķvārpstas skrūvju savienojumu. Tagad, izmantojot dinamometrisko uzgriežņu atslēgu un sešstūra ligzdu, atskrūvējiet skrūvju savienojumus abās pusēs SW 14.

4.4 3. solis - kloķu noņemšana no ass

Ar roku ieskrūvējiet izvilkēju ass stiprinājuma vītņē. Pagrieziet UZS izvilkēja 17skrūvi ar uzgriežamo atslēgu SW, līdz kloķvārpsta ir atslābusi, un tagad kloķvārpstu var viegli noņemt. Noņemiet vilcēju no kloķvārpstas ar atslēgu SW19 un atgrieziet to sākotnējā stāvoklī, pagriežot pret UZS. Tādā pašā veidā rīkojieties ar kloķi otrā pusē.

4.5 4. solis - Regulējamo kloķu uzstādīšana


Noņemiet melnos vāciņus no abu kloķu atverēm. Ja kloķi vēl nav iestatīti o. pozīcijā, iestatiet tos uz montāžai nepieciešamo o. pozīciju, atverot saspiešanas sviru un velkot atbrīvošanas pogu. Kloķi ir marķēti ar L kreisajai pusei un ar R labajai pusei, pārliecinieties, ka tie ir pareizajā pozīcijā, pretējā gadījumā pedāļi var atlaisties. Novietojiet kloķi ar L kreisajā pusē uz ass kvadrāta. Tagad ar dinamometrisko uzgriežņu atslēgu ieskrūvējiet iepriekš noņemto skrūvi atpakaļ asī un pievilciet to līdz 60Nm. Tāpat rīkojieties arī otrā pusē.

4.6 5. solis - Pedāļu montāža

Pedāļi ir marķēti arī ar L - kreisais un R - labais. Montāžas laikā pārliecinieties, ka kreisā puse ir ieskrūvēta pret UZS, bet labā puse ir ieskrūvēta UZS. Pievelciet pedāļus ļoti stingri, pretējā gadījumā tie var atlūzt.

5 V-veida kloķa izmantošana

Kā īsi4 norādīts šajā solī, V veida kloķu garumu var regulēt, atvienojot fiksācijas sviru (A) un velkot fiksācijas skrūvi (B). Kloķa pozīciju var nolasīt no sānu skalas. Pēc kloķvārpstas regulēšanas ir svarīgi pārliecināties, ka fiksācijas skrūve (B) ir ieslēgta un fiksācijas svira (A) ir bloķēta un pielīdzināta kloķvārpstai (sk. attēlu). Lai panāktu saspiešanas sviras izlīdzinātu pozīciju, to var nedaudz pacelt bloķētā stāvoklī un novietot vēlamajā pozīcijā. Ja tas netiek izdarīts, lietotājs var gūt traumas vai sabojāt kloķi un mašīnu.

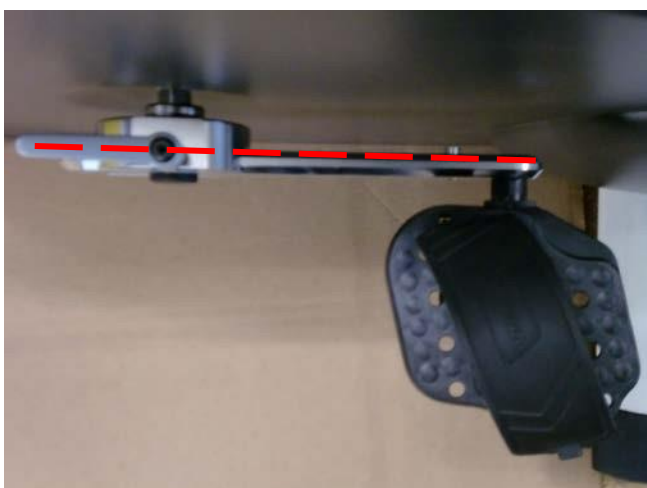

6 Garantija

Tas pamatojas uz likumā noteikto garantiju.

EMOTION FITNESS GmbH & Co KG kā šī izstrādājuma izplatītājs nodrošinās bezmaksas servisa pakalpojumus profesionāliem lietotājiem vairāku mēnešu6 garumā par rezerves daļām un darbu, ja tiks pierādīta šajā rokasgrāmatā aprakstītā pareiza lietošana un kopšana.

Garantijas prasība zaudē spēku, ja produktu apkalpoja vai remontēja nepiederošas personas. Tiklīdz rodas garantijas pretenzija, jums nekavējoties jāinformē EMOTION FITNESS GmbH & Co KG. Ierīces īpašniekam ir jāsniedz informācija par ierīces sērijas numuru, iegādes laiku un piegādes avotu.

EMOTION FITNESS GmbH & Co KG organizēs pakalpojumu, bet patur tiesības noteikt pakalpojuma veidu.

Ir iespējamas šādas procedūras.

1. Pakalpojumu uz vietas veic mūsu servisa nodaļa.
2. Mēs nosūtīsim nepieciešamo rezerves daļu.
3. Mēs nosūtīsim rezerves ierīci.

Klientam defektētās detaļas mums ir jānosūta atpakaļ 48 stundu laikā. Pretējā gadījumā par piegādātajām rezerves daļām tiks iekasēta maksa.

Ja cēloņi ir ārpus garantijas darbības jomas, EMOTION FITNESS GmbH & Co. KG patur tiesības iekasēt visas remonta izmaksas.

Garantija neattiecas uz dažām nodilstošām detaļām. Tie jo īpaši ir sēdeklis, kloķi un kloķu stiprinājums, pedāļi, pedāļu siksnas, akumulatori, kāju protektori, polsterējuma audumi un roktura gumijas rokturi. Polar impulsu sistēmām ir spēkā ar likumu noteiktā garantija.

Šie garantijas noteikumi nekādā veidā neietekmē vispārējās likumā noteiktās prasības.

Mūsu Vispārīgos piegādes noteikumus un nosacījumus, kas laiku pa laikam tiek grozīti, var apskatīt un lejupielādēt no mūsu tīmekļa vietnes www.emotion-fitness.de.



emotion fitness GmbH & Co KG
Trippstadter Str. 68
67691 Hochspeyer
Tālrunis 06305-71499-0
Fakss 06305-71499-111
info@emotion-fitness.de
www.emotion-fitness.de
Ražotājs EUDAMED SRN: DE-MF-000016584

