

Instrucciones de uso para



Entrenador elíptico *del* *motion cardio line 900 &* *motion cardio line 900 med*



motion cross 900
motion cross 900 med

Contenido

1.	General	3
2.	Clasificación de los dispositivos.....	3
3.	Instrucciones de seguridad	4
	Instalación segura del equipo	4
	Formación segura	5
	Indicaciones y contraindicaciones	6
4.	Manejo de la pantalla	7
	Visión general de la pantalla/funciones de las teclas	7
	Selección de programas	8
	Sistemas de impulsos	8
	Carga inductiva (opcional)	9
5.	Cuidado, mantenimiento y revisión.....	9
	Guía de detección de fallos (mal funcionamiento).....	13
	Instrucciones de mantenimiento para el operador.....	13
	Mantenimiento a cargo de un especialista autorizado	13
	Calibración/mantenimiento	14
6.	Datos técnicos	14
7.	Eliminación.....	14
8.	Garantía	15

1. General



Antes de utilizar el equipo de entrenamiento por **primera vez**, lee atentamente este manual del usuario con todas las instrucciones y advertencias de seguridad para garantizar un uso seguro y adecuado. Conserve este documento para futuras consultas y entrégueselo a otras personas si cede el equipo.

La finalidad del equipo es el entrenamiento cardiopulmonar y la carga reproducible del cuerpo, por ejemplo, para medidas diagnósticas y terapéuticas. El equipo es utilizado principalmente por los usuarios en cardiología, fisioterapia, medicina deportiva y en el hogar. Otra aplicación es el uso para desarrollar y fortalecer los músculos esqueléticos, así como para aumentar la movilidad en las articulaciones afectadas durante el entrenamiento.

El equipo permite la carga física reproducible del cuerpo humano y del sistema cardiovascular con fines de prevención, rehabilitación y diagnóstico.

El texto con fondo gris indica las secciones de texto que tratan exclusivamente de las características de equipamiento de la línea de fitness.

2. Clasificación de los dispositivos

- Los aparatos de la *línea cardio 900 med* son productos médicos **MD** según la directiva 93/42 EWG, clasificados en la clase IIa. En el rango de control del freno, la precisión de visualización es de +/- 5% o +/- 3 vatios para cargas inferiores a 50 vatios.
- Los aparatos de la *línea cardio 900 cumplen* la norma DIN EN ISO 20957-1 y DIN EN ISO 20957-5; clase de aplicación S (uso comercial/estudio) y H (uso doméstico) de clase de precisión A +/- 10 % y están diseñados exclusivamente para el sector del fitness y el deporte.

Sólo 1 persona puede hacer ejercicio con el equipo a la vez; no debe superarse el peso máximo del usuario según la placa de características.

3. Instrucciones de seguridad

Instalación segura del equipo

Asas móviles para entrenar todo el cuerpo

Placa de posición

Pedales

Pantalla para mostrar los datos de entrenamiento y ajustar la marcha

Empuñaduras rígidas para sujetar los miembros inferiores durante los

Pies ajustables para nivelación



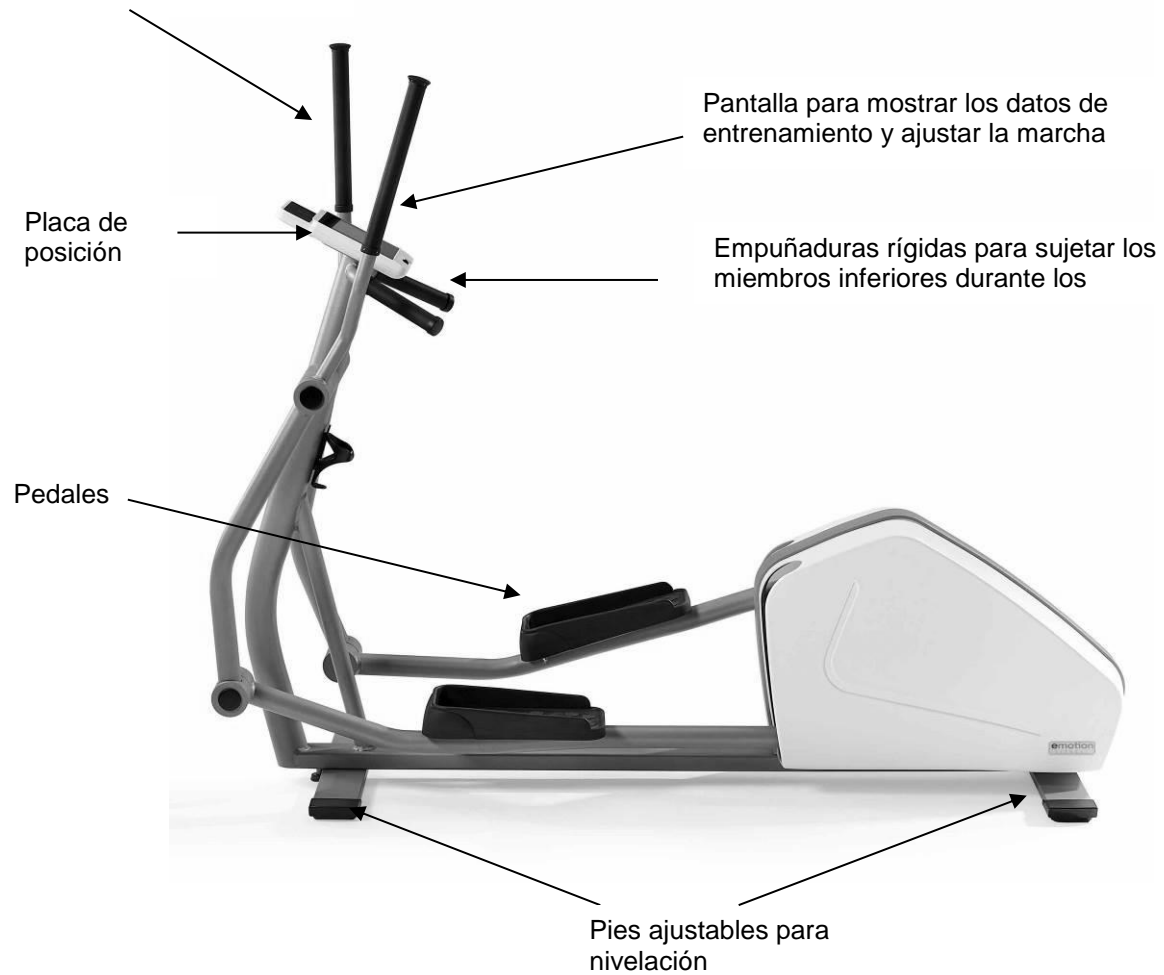


Fig.1: Vista del dispositivo motion cross 900 y motion cross 900 med con designación de los elementos esenciales



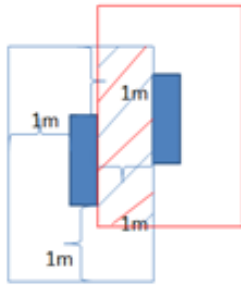

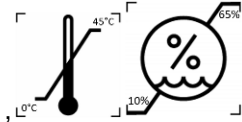

- Coloque la unidad sobre una superficie firme, horizontal, nivelada y antideslizante y nivele la unidad con los tornillos de ajuste para que no se tambalee.
- El área libre alrededor de la unidad debe ser al menos 1 m mayor que el rango de movimiento de la unidad para garantizar un acceso y salida seguros de la unidad incluso en casos de emergencia. No obstante, las distancias de seguridad pueden solaparse (véase la imagen).



- Coloque el aparato únicamente en locales secos a 10°C.
- Asegúrese de que no haya radiación electromagnética, por ejemplo, de antenas de radio, tubos fluorescentes radiantes, etc., ya que pueden afectar a la medición del pulso.
- La parte inferior del bastidor debe estar siempre libre para permitir una ventilación suficiente.
- Todas las unidades mencionadas aquí son independientes de la red eléctrica. Generan la energía por sí mismos durante el funcionamiento o se alimentan durante la programación mediante el condensador incorporado de serie. El condensador se carga por formación y tiene una vida útil de > 20000 ciclos.
- Atención: Siga siempre las instrucciones de cuidado, mantenimiento y reparación del capítulo 5 de este manual.

Formación segura

- Antes de empezar a entrenar, una persona autorizada, por ejemplo un médico, debe comprobar la aptitud para el entrenamiento. Tenga en cuenta el punto "Indicaciones y contraindicaciones".
- Tenga en cuenta que el ejercicio excesivo puede ser perjudicial.
- En caso de náuseas o mareos, interrumpa inmediatamente el entrenamiento y consulte a un médico.
- El entrenamiento con el equipo sólo está permitido con la piel intacta.
- Al entrenar, es preferible llevar ropa deportiva ajustada y ligera para que no pueda engancharse en partes del aparato durante el entrenamiento. Lleve siempre calzado deportivo adecuado para pisar con seguridad los pedales.
- Antes de comenzar el entrenamiento, compruebe que la unidad no presenta defectos, que no hay piezas defectuosas o posibles manipulaciones. Si encuentra algún defecto o no está seguro, pregunte al supervisor antes de iniciar la formación.
- Antes de iniciar el entrenamiento, asegúrese de que no haya nadie cerca de las piezas en movimiento para evitar poner en peligro a terceros. En particular, los niños sin supervisión deben mantenerse alejados del equipo.
- La bicicleta elíptica no tiene rueda libre. Por lo tanto, el ejercicio no puede ser detenido bruscamente por el usuario. Por lo tanto, utilice el botón de pausa/parada de la pantalla o deje que el movimiento se ralentice.
- El botón de pausa/parada está siempre activo como función de seguridad y frena el movimiento inmediatamente cuando se pulsa el botón. Además, la unidad tiene un límite de velocidad, que está fijado en 80 rpm por defecto. Si intenta superar las 80 rpm, la velocidad se reduce por debajo del límite mediante una intervención del freno. Si desea ajustar el límite, póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica.
- Para entrenar correctamente desde el punto de vista biomecánico, no es necesario realizar ningún ajuste en el aparato. Simplemente asegúrate de que tus pies están completamente sobre los pedales y de que agarras las asas móviles aproximadamente a la altura de los hombros. Evite las espaldas encorvadas o las posiciones cruzadas de la barra durante el entrenamiento y nunca mantenga las articulaciones de las rodillas y los codos en posición no flexionada (0=posición).
- Para entrenar sólo las extremidades inferiores, utilice las empuñaduras rígidas. Tenga en cuenta que las empuñaduras móviles oscilan y podrían lesionarle.

-  **Advertencia:** El sistema de monitorización de la frecuencia cardiaca es susceptible de fallar debido al sistema. El ejercicio excesivo puede provocar lesiones peligrosas o la muerte. Si se encuentra mal, deje de hacer ejercicio inmediatamente y consulte a su médico o terapeuta.
-  **Advertencia:** El aparato sólo debe utilizarse con carcasa y en locales secos.
-  **Advertencia para la conexión de alimentación opcional:** Utilice únicamente fuentes de alimentación homologadas que hayan sido probadas según la norma IEC 60601-1 y aprobadas por el fabricante de la unidad. Asegúrese de que la fuente de alimentación esté instalada de forma que sea difícil desconectarla (por ejemplo, mediante depósitos en el suelo, instalación bajo la unidad o conductos de cables, posición de la fuente de alimentación en zonas de difícil acceso).
-  **Advertencia:** Si se modifica el producto sanitario, deben llevarse a cabo las investigaciones y pruebas adecuadas para garantizar un uso seguro continuado. No modifique el dispositivo sin el permiso del fabricante.

Indicaciones y contraindicaciones

Antes de empezar a entrenar, consulte a un médico o terapeuta para asegurarse de su aptitud para el entrenamiento.

Ejemplos de indicaciones

- Movilidad del sistema musculoesquelético
- Fortalecimiento de la musculatura
- Fortalecimiento del sistema cardiovascular

Ejemplos de contraindicaciones

- Enfermedades cardiovasculares
- Dolor del sistema musculoesquelético
- Durante la formación:
 - Dolor torácico
 - Malestar
 - Náuseas
 - Mareos
 - Falta de aliento

Pregunte al médico si está tomando medicación.

4. Manejo de la pantalla

Diversos programas de entrenamiento y prueba permiten un entrenamiento individual y variado con las máquinas motion cardio line 900 y motion cardio line 900 med.

	cross 900 / 900 med
Equipamiento básico	Inicio rápido, entrenamiento cronometrado, entrenamiento de pulso
incl. paquete de programas	Inicio rápido Calificación Entrenamiento del pulso + 7 programas más + 4 programas de equilibrio de movimiento

Visión general de la pantalla/funciones de las teclas



Fig. 2: Vista del monitor, explicando las funciones de los botones, la vista real puede variar en color, la asignación de los botones es la misma.

Explicación de los botones:

- El **botón Home** es un botón físico situado debajo del cristal de la pantalla. Se pulsa para acceder al menú principal. Al pulsar el botón INICIO durante un tiempo prolongado (al menos 6 segundos) se reinicia la electrónica del monitor.
- Pulse el botón **PAUSA** (⏸) para pausar el entrenamiento.
- Pulsando el botón **PLAY** (▶) se inicia o reanuda el entrenamiento.
- El botón **COOL** ❄ detiene inmediatamente el entrenamiento. Inmediatamente se genera un resumen de los resultados del entrenamiento, se muestra y, si es necesario, se envía a un software de control de entrenamiento compatible.
- Utilice las teclas **"+"** o **"-"** para aumentar o disminuir los parámetros o valores de potencia que desee ajustar.
- Utilice las **teclas de flecha para** navegar por los menús correspondientes y confirmar valores o ajustes.
- Los gestos de deslizamiento y barrido permiten navegar por la selección de programas.

Dependiendo del programa, se muestran algunos de los siguientes parámetros:

- Nombre del programa.

- Tiempo: Tiempo de entrenamiento completado o restante.
- Pulso: Indicador de frecuencia cardiaca, cuando se utiliza una correa transmisora de pulso compatible. La pantalla del indicador de pulso muestra el rango de pulso actual para programas con pulso objetivo o máximo. El indicador de perfil en la pantalla muestra la progresión del rango de intensidad durante el entrenamiento.
- Vatios: La potencia se muestra en vatios. Paralelamente, la intensidad se aclara mediante una visualización gráfica en el perfil.
- km/h: La velocidad ficticia se muestra en km/h.
- Velocidad: Revoluciones del pedal por minuto.
- L/R (no con cuerpo 900/900 med): La relación de fuerza de la pierna izquierda y derecha se muestra aquí en %.
- HRV: La variabilidad de la frecuencia cardiaca se muestra a través del valor RMSSD (requiere el sensor **POLAR** H10).
- resp: Frecuencia respiratoria (requiere el sensor **POLAR** H10)
- km: Distancia añadida o restante. La indicación es en metros; a partir de 1000 m en pasos de 10 m (1,00 km).
- K-Cal: Consumo de calorías añadidas o restantes.
- Nivel: Nivel de intensidad 1 - 21.
- ∅: Si los parámetros se completan con este símbolo, se trata de valores medios.

Resultados

Tras la finalización de un programa de entrenamiento o la finalización prematura mediante COOL (❄️), los resultados se muestran en el monitor y se produce un enfriamiento de 3 minutos. Esto puede cancelarse mediante el botón INICIO.

Algunos de los valores son promediados (Vatios, Km/h, RPM, Pulso, Altitud/ min), otros son acumulados (Km, K-Cal, Tiempo, Altitud). Los valores medios están marcados con el símbolo ∅. Estos resultados permiten controlar la evolución del rendimiento personal y sirven así de motivación.

Selección de programas

El programa de entrenamiento deseado puede seleccionarse en el menú principal pulsando el símbolo correspondiente. A continuación, accederá a la página de configuración, donde podrá ajustar los parámetros de entrenamiento correspondientes. Pulse el botón **PLAY** (▶) para confirmar la entrada e iniciar el entrenamiento. Puede volver al menú principal mediante el icono de inicio o el botón de inicio.

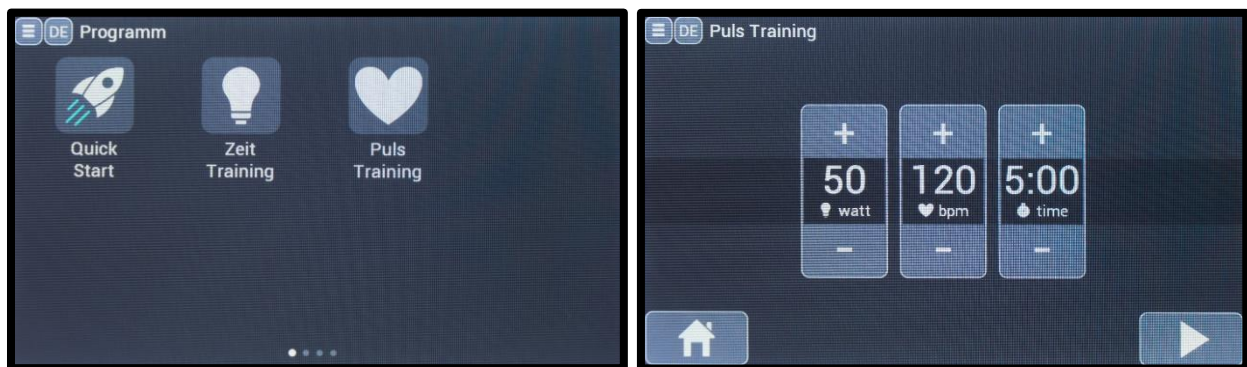


Fig. 3: Selección y configuración del programa para el entrenamiento manual.

Sistemas de impulsos

Los aparatos de la línea motion cardio 900 y de la línea motion cardio 900 med disponen del original sistema de pulso **POLAR**, en el que la adquisición de la señal se realiza de serie mediante una banda pectoral. Esto permite el entrenamiento individual en varios programas. La transmisión inalámbrica de datos a la electrónica de la pantalla está codificada (a través de 5kHz o Bluetooth). La nueva tecnología "Auto-Pairing" de **POLAR** se basa en una transmisión de datos segura y sin interferencias a través de Bluetooth. Esta tecnología requiere el uso de los transmisores H10 o H9. Otros parámetros, como la VFC y la frecuencia respiratoria, también se transmiten al monitor a través de la conexión Bluetooth.

Si se utilizan los transmisores antiguos, por ejemplo, con codificación T31, existe compatibilidad descendente. No obstante, hay que tener en cuenta que puede haber interferencias con la transmisión de la señal a través de la tecnología de 5 kHz.

El color del símbolo del corazón parpadeante indica la tecnología utilizada.
 azul claro=Bluetooth verde=5kHz

ANT+

Los aparatos de las líneas motion cardio 900 y motion cardio 900 med permiten, además de la transmisión de la frecuencia cardíaca a través de 5kHz/Bluetooth, una transmisión opcional de datos a través de ANT+.

Para ello es necesario el paquete de prestaciones. Por defecto, la tecnología Polar 5kHz/Bluetooth está activada. Para activar la transmisión a través de ANT+, el interruptor "ANT+" del cuadro de información (☰) debe estar activado (marcado en amarillo aquí). A continuación, puede establecerse una conexión con una unidad transmisora que envíe la frecuencia cardíaca a través de ANT+. Un símbolo de corazón azul oscuro parpadeante confirma la transmisión de la frecuencia cardíaca a través de ANT+.



Fig. 4: Activación de ANT+ para la transmisión de la frecuencia cardíaca

Instrucciones de seguridad según DIN EN ISO 20957

Advertencia. Los sistemas de monitorización de la frecuencia cardíaca pueden ser inexactos. El ejercicio excesivo puede causar graves daños a la salud o la muerte. Deje de hacer ejercicio inmediatamente si se siente mareado o débil.

Carga inductiva (opcional)

En todas las unidades motion cardio line 900 y motion cardio line 900 med puede activarse un módulo de carga inductiva opcional a través del "paquete connect". Esto permite cargar sin contacto los dispositivos móviles que cumplen el estándar Qi (Φ). Se recomienda a los usuarios de marcapasos o desfibriladores implantados que mantengan una distancia mínima de 10 cm de la bobina de carga.






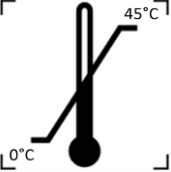



5. Cuidado, mantenimiento y revisión



Todos los equipos de cardio de emotion fitness son duraderos y requieren poco mantenimiento para funcionar como equipos de entrenamiento durante mucho tiempo. Sin embargo, es imprescindible realizar los cuidados necesarios a conciencia.

⚠ Advertencia: El aparato sólo puede ser abierto por un especialista autorizado.

Símbolos y significado

Señal de seguridad	Referencia	Título
--------------------	------------	--------

	ISO 7010-P017	Prohibido empujar
	ISO 7010-W012	Advertencia, Electricidad
	ISO 7000-1641	Instrucciones de uso
Sicherheitshinweis gemäß DIN EN ISO 20957 Warnung! Systeme der Herzfrequenzüberwachung können ungenau sein. Übermäßiges Trainieren kann zu ernsthaftem gesundheitlichem Schaden oder zum Tod führen. Bei Schwindel- Schwächegefühl sofort das Training beenden.	DIN EN ISO 20957	Aviso de seguridad Monitorización de la frecuencia cardíaca
	ISO 7000-3082	Fabricante
	ISO 7000-2497	Fecha de fabricación
	ISO 7000-0632	Límite de temperatura
	ISO 7000-2620	Humedad del aire, limitación
	ISO 7010-W001	Señal de advertencia general
	ISO 7010-M002	Siga las instrucciones de funcionamiento

	IEC 60417-5840	Parte aplicada de tipo B (se refiere al sillín, los pedales y el manillar)
	ISO 15233	Productos sanitarios

El nivel de seguridad de las unidades sólo puede mantenerse si éstas se revisan periódicamente en busca de daños y desgaste. Las piezas defectuosas deben sustituirse inmediatamente y la unidad debe pararse hasta que se repare.

Diagnóstico de averías

Pueden aparecer los siguientes mensajes de error. Si el error aparece repetidamente, las medidas indicadas a continuación pueden ayudar. Si éstas no conducen al éxito, deberá ponerse en contacto con el fabricante y, en caso necesario, con el fabricante del software.

Mensaje de error	Medida/s	Tipos de unidades afectadas
"Error RFID"	<ul style="list-style-type: none"> El número RFID, es decir, el número del transpondedor, es demasiado corto o demasiado largo. Se ha producido un error al leer el número RFID. → utilizar un transpondedor diferente 	Todos los ergómetros
"¿Sensor cardíaco?"	El monitor desea iniciar un programa que requiere el uso de un sensor de frecuencia cardíaca. Si no se encuentra ningún sensor, aparece este mensaje.	Todos los ergómetros
"Problema USB"	El mensaje de radio se envió correctamente desde el módulo de radio del monitor al módulo de radio del PC (es decir, el módulo receptor acusó recibo del mensaje), pero no hubo respuesta del PC tras el periodo de tiempo especificado: → Reinicie el PC y vuelva a conectar el dongle USB al PC. Si es necesario, reinicie el servicio de software.	Todos los ergómetros
"Problema de radio"	<ul style="list-style-type: none"> La unidad no recibe respuesta del dongle USB. Atención. Este mensaje de error también puede aparecer si el mensaje enviado desde el dongle al monitor es defectuoso (por ejemplo, formato incorrecto o mensaje incompleto). → Reinicie el PC y vuelva a conectar el dongle USB al PC. Si es necesario, reinicie el servicio de software. 	Todos los ergómetros
"Error NDEF: longitud"	<ul style="list-style-type: none"> El mensaje encontrado en la etiqueta NFC (es decir, el mensaje transmitido desde el smartphone) es demasiado largo. → Póngase en contacto con el fabricante del software o del dispositivo 	Todos los ergómetros
"NDEF err: verify"	<ul style="list-style-type: none"> No se ha podido acceder a la etiqueta NFC. Se trata de un problema de autorización al acceder a la etiqueta NFC a través del monitor utilizando la supercontraseña. → Póngase en contacto con el fabricante o productor del software 	Todos los ergómetros
Valor que falta: XX (XX=número)	<ul style="list-style-type: none"> El software del PC no ha enviado al ergómetro un parámetro de ajuste necesario → Póngase en contacto con el fabricante o el productor del software. 	Todos los ergómetros
Valor XX fuera de rango (XX=número)	<ul style="list-style-type: none"> Se ha enviado un parámetro de ajuste necesario fuera del rango permitido desde el software del PC a la unidad → póngase en contacto con el fabricante o el productor del software. 	Todos los ergómetros

Guía de detección de fallos (mal funcionamiento)

Si se produce algún fallo en el equipo que no pueda clasificar, póngase en contacto con emotion fitness GmbH & Co.KG. Para cada mensaje de error, debería tener a mano el número de serie y el tipo de modelo del aparato defectuoso, ya que podría ser importante para poder realizar el diagnóstico correcto y, sobre todo, ¡para suministrarle las piezas de recambio adecuadas!

Instrucciones de mantenimiento para el operador

Lo ideal es inspeccionar visualmente la unidad antes de cada uso, pero al menos a diario, y prestar especial atención a las piezas defectuosas, las conexiones sueltas y los ruidos atípicos.

Las siguientes comprobaciones deben realizarse al menos cada 6 meses:

- Inspeccione visualmente todas las juntas visibles, así como las soldaduras.
- Limpie a fondo la unidad.
- Compruebe el apriete de todas las uniones atornilladas.
- Compruebe la integridad y resistencia de los pedales y las bielas.

En general:

- Limpie periódicamente la carcasa de plástico y las piezas del bastidor, según sea necesario, con un paño húmedo y jabón neutro, y séquelas de nuevo.
- No se permite el uso de botellas de spray con productos de limpieza; se ha demostrado que las unidades nunca se secan en lugares inaccesibles. No se puede descartar la aparición de óxido mediante este procedimiento.
- Asegúrese de que no entre líquido en la carcasa del monitor,
- Para cualquier desinfección necesaria de los dispositivos, utilice únicamente toallitas desinfectantes mikrozid® sensitive wipes (<http://www.schuelke.com/>).
- La pantalla del monitor puede mostrar una tensión del condensador demasiado baja, con la que no se puede garantizar con seguridad un funcionamiento sin corriente de frenado. Puede recargar el condensador pedaleando con una carga mayor o con una fuente de alimentación homologada por el fabricante del aparato.
- Compruebe el apriete de las fijaciones de la carcasa.
- Recomendamos una inspección visual periódica de todas las piezas de la unidad, especialmente tornillos, soldaduras y otras fijaciones.
- Compruebe que las patas del aparato estén bien asentadas.
- Utilice únicamente piezas de repuesto originales; para ello, póngase en contacto con nosotros.

Mantenimiento a cargo de un especialista autorizado

En caso de problemas con el aparato que no pueda resolver usted mismo de forma sencilla, póngase siempre en contacto con el servicio técnico de emotion fitness. El servicio autorizado le ayudará de forma rápida y competente o le proporcionará instrucciones.

Calibración/mantenimiento

En las máquinas elípticas y sube-escaleras (cross y stair), no se requiere MTK por ley para el operador. Esto se debe a que el peso corporal influye en la potencia resultante en estas máquinas. emotion fitness GmbH & Co. KG ofrece calibrar la potencia de frenado bajo petición.

Además, recomendamos un **mantenimiento** con inspección de los componentes relevantes para la seguridad (STÜ) por parte de empleados/socios autorizados **cada 12 meses**.

Esta sección se refiere a la situación legal en Alemania. Por favor, compruebe la legislación aplicable para el funcionamiento de productos sanitarios en su país.

Los productos con el sufijo "med" son conformes a la Directiva 93/42/CEE sobre productos sanitarios. Por tanto, llevan el marcado CE y el número del organismo notificado.

El distribuidor/operador es responsable de llevar a cabo el mantenimiento, la revisión y la calibración, así como las posibles inspecciones de acuerdo con las leyes y normativas regionales aplicables en la ubicación de las unidades.

Su distribuidor local autorizado también puede proporcionarle más información.

6. Datos técnicos

Tipo de dispositivo	Dimensiones (L/A/A)	Peso	Peso máximo del usuario	Carga de trabajo segura
motion cross 900 motion cross 900 med	200 cm x 65 cm x 169 cm	101 kg	150 kg; reforzado: 200 kg	251 kg; reforzado: 301 kg

Sistema de resistencia: Sistema de frenado independiente de la red principal

Rango de potencia: independiente de la velocidad: 100-500 vatios (opcionalmente 100-950 vatios);
dependiente de la velocidad: 100-1.000 vatios

Rueda libre: no disponible

Se cumplen las siguientes directivas de la UE:

2001/95/CE Directiva relativa a la seguridad general de los productos

93/42/CEE Directiva sobre productos sanitarios Clase IIa (sólo se cumple para los productos con el sufijo med)

2014/30/EU Directiva CEM

Se utilizaron las siguientes normas:

DIN EN ISO 20957-1 Clase de precisión A, clase de uso SH; DIN EN ISO 20957-5;

DIN EN 60601-1:2013; DIN EN 60601-1-2

* Los valores pueden variar debido a cambios de unidades y opciones.

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas y ópticas, así como errores de impresión.

7. Eliminación

Con la celebración del contrato de compra, se considerará acordado que los clientes comerciales eliminarán ellos mismos los

Directiva 2002/96/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

8. Garantía

Esto se basa en la garantía legal.

emotion fitness GmbH & Co. KG, como distribuidor de este producto, proporcionará servicio gratuito durante 12 meses en piezas y mano de obra para usuarios profesionales si se puede verificar el uso y cuidado adecuados indicados en este manual de usuario. Durante 12 meses más, emotion fitness GmbH & Co. KG proporcionará piezas de repuesto gratuitamente.

El derecho de garantía caduca si el producto ha sido revisado o reparado por personas no autorizadas. En cuanto se produzca una reclamación de garantía, deberá comunicarlo inmediatamente a emotion fitness GmbH & Co KG por escrito o por correo electrónico. El propietario del aparato deberá facilitar información sobre el número de serie del aparato, la fecha de compra, una descripción detallada del fallo y la fuente de suministro.

emotion fitness GmbH & Co KG organizará un servicio, pero se reserva el derecho a determinar el tipo de servicio.

Son concebibles los siguientes procedimientos:

1. el servicio lo realiza in situ nuestro servicio.
2. enviamos la pieza de recambio deseada.
3. le enviaremos una unidad de sustitución.

El cliente deberá devolvernos inmediatamente las piezas defectuosas. En caso contrario, se facturarán las piezas de recambio entregadas.

Si las causas se encuentran fuera del ámbito de la garantía, emotion fitness GmbH & Co. KG se reserva el derecho a cobrar todos los costes de reparación.

Algunas piezas de desgaste no están cubiertas por la garantía. Se trata, en particular, del sillín, las bielas y la fijación de las bielas, los pedales, los bucles de los pedales, los tejidos de la tapicería y la goma de agarre del manillar. Los sistemas de pulso **POLAR** vienen con la garantía legal.

Estas disposiciones de garantía no afectarán en modo alguno a las reclamaciones legales generales. Puede consultar y descargar nuestras Condiciones Generales de Entrega, en su versión modificada, en nuestro sitio web www.emotion-fitness.de.

CE 0633

Gracias por su confianza.

emotion
FITNESS

Fabricante

emotion fitness GmbH & Co. KG

Trippstadter Str. 68

67691 Hochspeyer, Alemania

Tel +49 (0) 6305-71499-0

Fax +49 (0) 6305-71499-111

Internet: www.emotion-fitness.de

Correo electrónico: info@emotion-fitness.de

Fabricante EUDAMED SRN: DE-MF-000016584

